

多重靜脈訓練手臂組

**Multi-Venous Access Arm Kit**



中文操作手冊

## 產品使用說明：

1. 將液體灌流整支手臂，從另一端流出。
2. 夾住輸液管停止滴注，完成後即可練習靜脈穿刺。
3. 建議使用小於21G 的針頭，有助於延長表皮及血管壽命。
4. 注射或穿刺前，先在局部噴上潤滑劑將有助於下針。

## 解剖模擬部位：

- Dorsal veins of hand (3) 手背靜脈叢(3 條)
- Cephalic vein 頭靜脈
- Median vein 正中靜脈
- Basilic vein 貴要靜脈
- Antecubital vein 前臂尺骨靜脈

**更換皮膚及血管操作：**當手臂穿刺的部分出現裂隙時，需更新皮膚或血管，以避免模擬血液滲出。建議在洗手盆更換皮膚或血管。

步驟：

### 【更換皮膚】

1. 用刀子劃破舊皮並從指端剝除，大拇指可一起取下(新的手皮皆具有大拇指) (如圖一)。
2. 拆下舊皮。

圖一




### 【更換血管】(保留表皮)

1. 在皮膚內側使用液體潤滑劑混合後。
2. 於手臂的頂端將皮膚慢慢地捲下來至手部指端，大拇指會隨著皮膚部分，一起拆下來。。
3. 將管路從軸心溝槽中移出，如有黏著物，需要先清除才能取出管線。
4. 清洗並乾燥血管手套後，用酒精擦拭，須完全將黏著物清除。
5. 將新的靜脈系統沿著手臂內的溝槽置入，(如圖二)，如果需要，可以適用快乾膠將靜脈與手臂黏牢。

圖二



6. 如戴手套般套上新皮膚套(先噴上潤滑劑，有助於穿套)，新手皮皆附有大拇指。
7. 從手指端將皮膚套整理平順
8. 往手臂滑入，經過手軸到手臂上端。

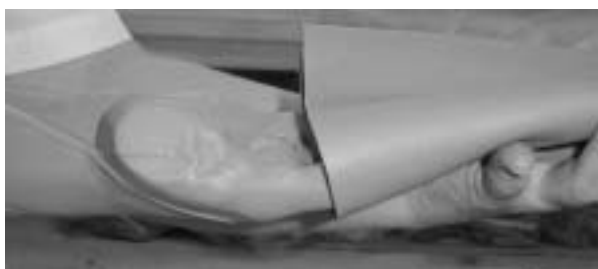

## 維護及保養:

1. 使用中性肥皂及清水清洗，但不可浸泡在水中。
2. 避免有色物品印漬，勿以報紙等油墨覆蓋或包裹。
3. 為延長產品的使用壽命，每次使用後均需仔細的檢查及清洗。
4. 肌肉注射綿墊要用清水或漂白水清潔後擰乾，確定乾燥再收起來，不可用烘乾。

## 組件包括：

手臂，更換皮套及多重血管，模擬血，軟血袋及輸液管，管夾及掛鉤，空針五支，專用潤滑噴濟，提箱及使用手冊

## 可更換零件：

產品編號	品名
38 07 00	Right Multi-Venous IV Arm 右側靜脈注射手臂
31 20 29	Skin & Multi-Vein Kit 皮膚套及血管
38 14 02	Adult Deltoid Pad 成人三角肌
300-00750	Blood Concentrate 濃縮模擬血液
TK-1003	Transfer Set Tubing 輸液套管
100 44 92	Arm Attachment Hardware Set 更換使用器具
100 29 61	IV Bag with Tubing Transfer Set 點滴袋及輸液管套
300-00650	Manikin Lubricant Spray 專用潤滑噴劑
CC-0014	Carry Case 攜帶箱